



Zalecenia dla osób użytkujących protezy ruchome



W przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych należy zgłosić się do stomatologa celem korekty protezy.

Codzienna higiena protezy

- Protezę należy czyścić po każdym posiłku pod strumieniem ciepłej wody z użyciem specjalnie dostosowanych do tego produktów oraz specjalnej szczoteczki – rekomendujemy **ELGYDIUM Clinic szczoteczkę do czyszczenia protezy dentystycznej**.
- Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, protezy nie należy użytkować przez całą dobę. Po wyjęciu i dokładnym umyciu, protezę należy przechowywać w suchym pojemniku.



Ważne informacje

- W przypadku uszkodzenia protezy (złamanie, wypadnięcie zęba) nie należy jej używać lub podejmować próby naprawy we własnym zakresie, należy osobiście zgłosić się do stomatologa w celu ustalenia przyczyn uszkodzenia i naprawy.
- Ponieważ nie wszystkie procesy patologiczne sygnalizowane są bólem istnieje konieczność okresowych wizyt kontrolnych u stomatologa (co 6 miesięcy).
- Proteza nieużywana przez dłuższy czas nie nadaje się do dalszego użytkowania.
- Podczas użytkowania protezy może dojść do powstania otarć, odleżyn i grzybicy jamy ustnej. Wspomagająco użyj **ELUGEL żelu stomatologicznego z chlorheksydyną 0,2%⁽¹⁾**. Jeżeli dolegliwości utrzymują się przez kilka dni należy skonsultować się ze stomatologiem.
- Protezę należy odkażać w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju grzybicy jamy ustnej (instrukcja na odwrocie).

(1) Miskiewicz A., Chlorheksydyna - leczenie stomatopatii protetycznej w dobie lekooporności Candida albicans. MS, 2014, 4 (260), 84-90

Jak odkazić protezę?

Regularne odkażanie protezy jest ważnym elementem higieny, ponieważ pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia grzybicy jamy ustnej. Do odkażenia protezy użyj EludrilCLASSIC płyn do płukania jamy ustnej⁽²⁾ (dostępny tylko w aptekach)



➤ Etap 1




Mechaniczne oczyszczenie protezy przy użyciu **szczoteczki ELGYDIUM Clinic do protez**

➤ Etap 2

Umieszczenie protezy w pojemniku lub szklance i zalanie jej rozcieńczonym płynem **EludrilCLASSIC**

3x

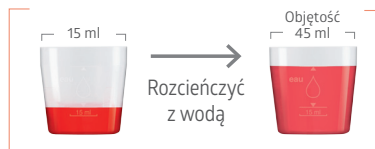

➤ Etap 3



Moczenie protezy przez **30 minut** minimum **1x w tygodniu**

(2) Wiench R. i in. Zastosowanie wodnego roztworu dwuglukonianu chlorheksydyny u pacjentów z grzybicą jamy ustnej. TPS. 2018. 4.